




关于灵智呼吸机的 使用

呼吸机各按键的含义 按键功能

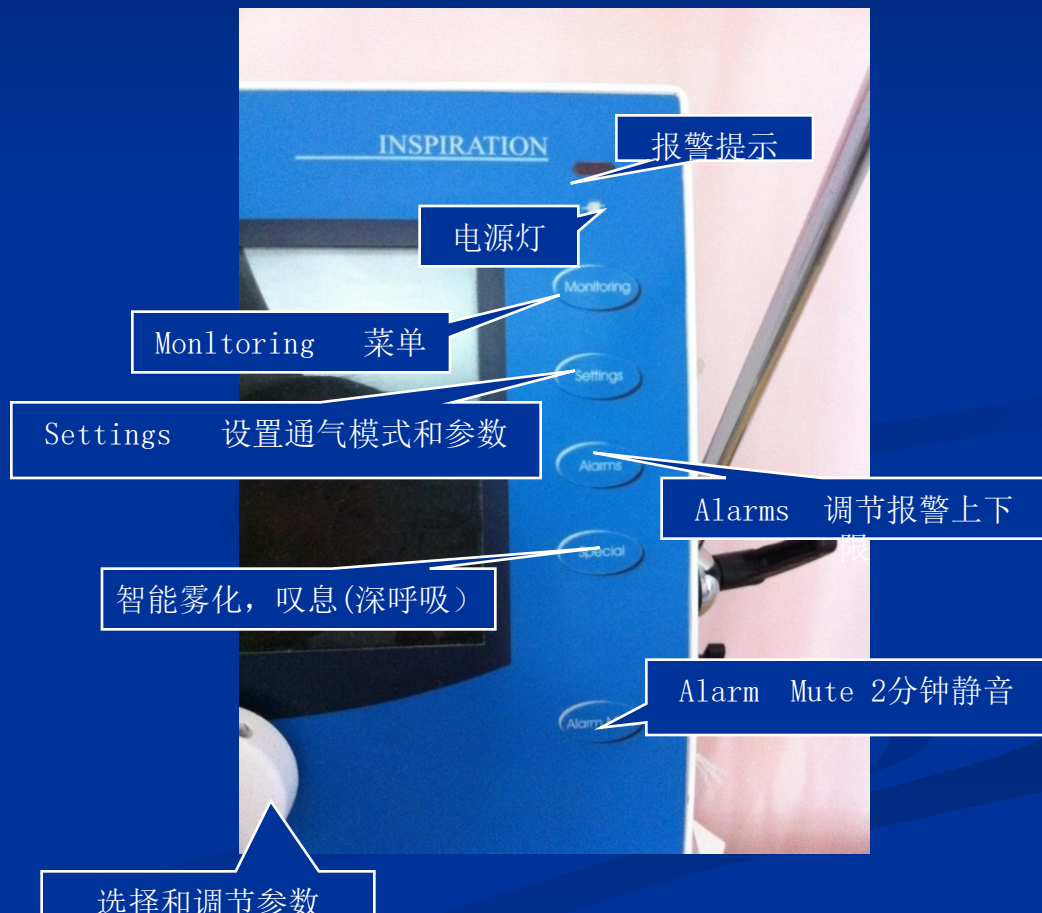


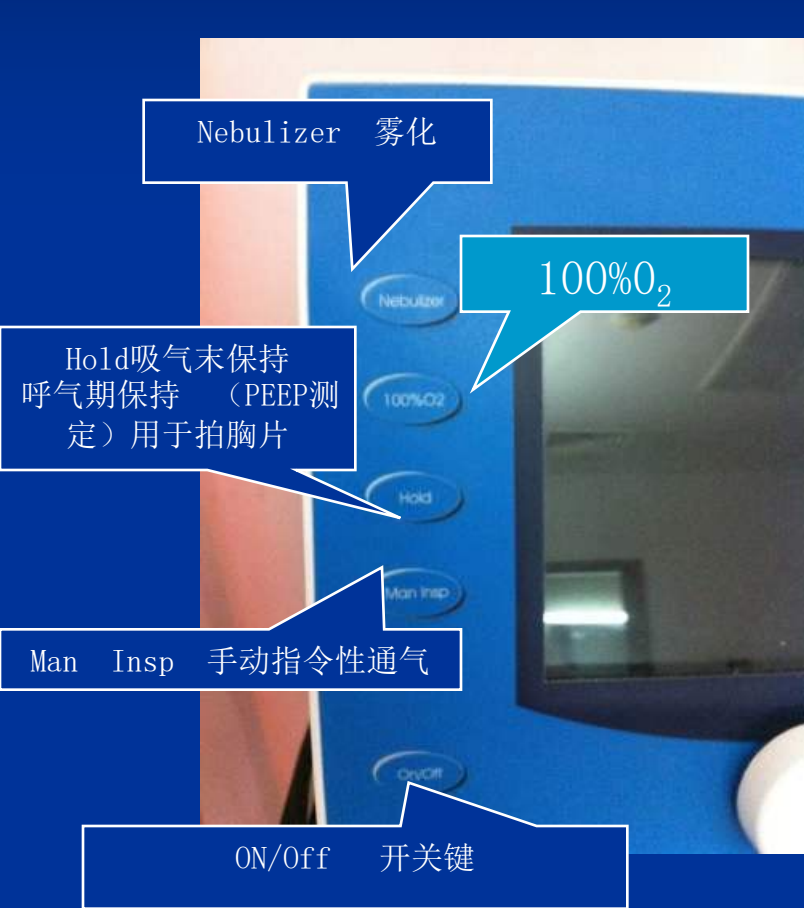

- 雾化Nebulizer 键
- 除了在病人类型为新生儿外，前板面上的雾化 (*Nebulizer*) **键可以将智能雾化器在所有的通气模式下开启或关闭。您可以在相关的屏幕上看到雾化器是否已被开启。**

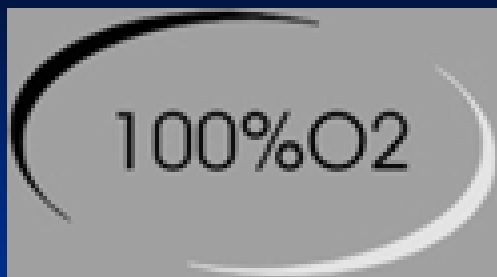

- 100% O2 特殊功能可以在所有的通气模式下进行。按下前板面上的**100% O2 键**即将其开启。吸入气的在5 分钟内为100% O2，**然后恢复到原来设定值。** 100% O2使用屏幕上都会有提示，在**100% O2 输送时间未结束之前，按下100% O2 键**可将该功能关闭

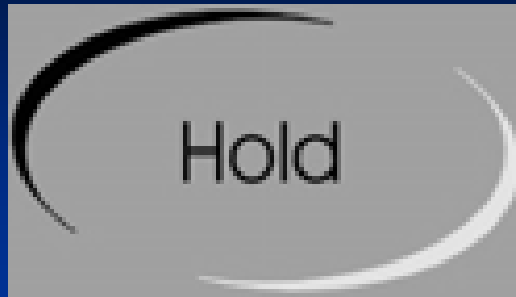

- 持续按下该键可使吸气末或呼气末得到保持，取决于按下保持 (*Hold*) 键的时间，如果按*Hold* 键，一个*Hold*提示会在屏幕的右上角显示。



- 按下手动吸气 (*Man Insp*) 键，在下一个呼气期间立即开始一次指令通气。如果持续按住该键，紧接着会有多次机械通气。如果按 *Man Insp* 键，显示器上会显示为手动 *Manual* 的提示。



- 按下呼吸机前面板的 *Monitoring* 快捷鍵即可选定监测屏幕。对病人监测的实时曲线与参数显示在其中。可选定显示所监测的参数与曲线。



- 您可以在开始屏幕按 *Next* 纽或按在呼吸机前板上的设定 (*Settings*) 键进入呼吸机设置屏幕。



- 按呼吸机前板上的报警 *Alarms* 快捷鍵，您可以进入报警设置屏幕。报警设置屏幕显示的是当前的报警限设置，您可以更改这些设置。每个报警的高限和低限是相互锁定的。（低限总是要小于高限）。



按呼吸机前板的 *Special* 导向键显示特殊功能屏幕。特殊功能屏幕可以选择的特殊功能包括：智能叹息 *Smart Sigh*[™]、智能雾化 *Smart Nebulizer*[™]、*SPAP* 设置显示设置锁定和屏幕的亮度（对比度）。



- 单个报警静音：按下后立即松开 *Alarm Mute* 键；一个新的报警或再按一下 *AlarmMute* 键报警静音被取消。两分钟静音，无论出现任何新的报警：按下并保持前板上的 *Alarm Mute* 键直到一个红色的静音符号出现。这使您在一些情况下，出现不同的新报警（如吸痰），可以预先消音。报警静音时，报警指示灯会亮同时屏幕会显示所有的报警信息。
- 报警记录按时间顺序列举最近130 个报警事件与其发生的日期和时间。



INSPIRATION



Nebulizer

100%O2

Hold

Man Insp

On/Off


Monitoring

Settings

Alarms

Special

Alarm Mute

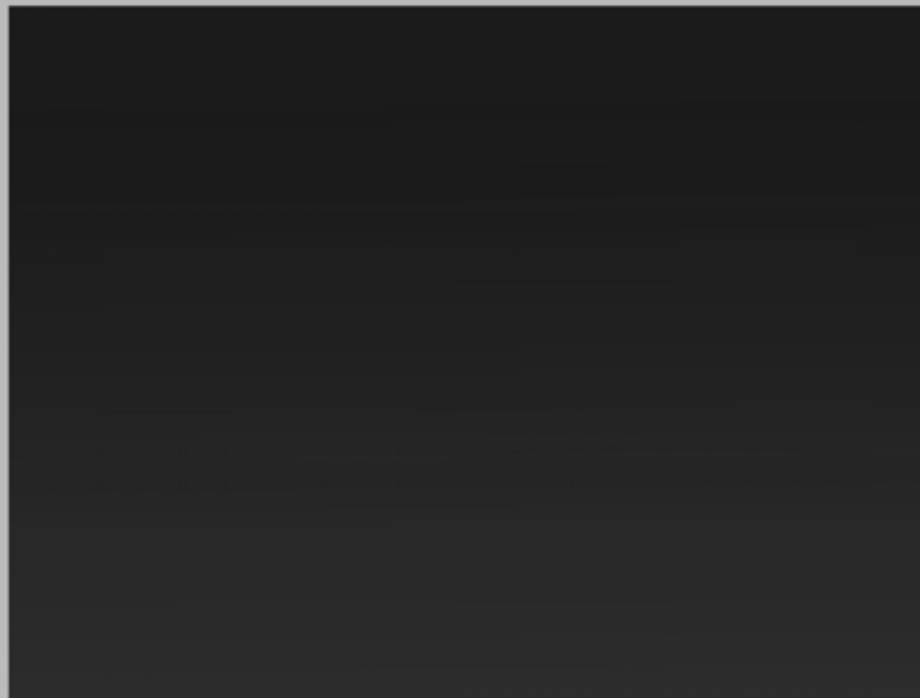

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/407126143123006065>